

Notice d'installation

Appui-tête universel pour fauteuil roulant

Contact :
boutique@handynamic.fr
Tel : 03 28 168 167

Contenu :

L'appui-tête universel se compose de deux parties principales :

- L'appui-tête
- Son support



Les outils dont vous avez besoin (non fournis) :

- Une clé 6 pans de taille 3



Etapes d'installation :

L'appui-tête se fixe fermement sur les tubes des poignées du fauteuil.

Voici les différentes étapes à suivre pour l'installer :

1. Retirer les deux grosses vis situées sur le côté des encoches noires.



2. Desserrer les deux petits pas de vis à l'arrière de l'appui-tête à l'aide de la clé 6 pans de taille 3.



3. Positionner les 2 encoches sur les poignées du fauteuil (avec ou sans l'encoche réducteur, cf. 1^{ère} photo ci-dessous).



4. Appuyer fermement sur l'encoche afin de pouvoir repasser la vis dans son logement, de façon à ce qu'elle passe derrière le tube du fauteuil. Resserrer les 2 grosses vis.




5. Vérifier que la largeur entre poignées est bonne puis resserrer les 2 petits pas de vis.



6. Il ne reste plus qu'à ajuster la position de l'appui-tête grâce aux 3 poignées noires. **Explications page suivante.**

Comment régler l'appui-tête ?

Tout d'abord, il faut identifier les 3 poignées de réglage :

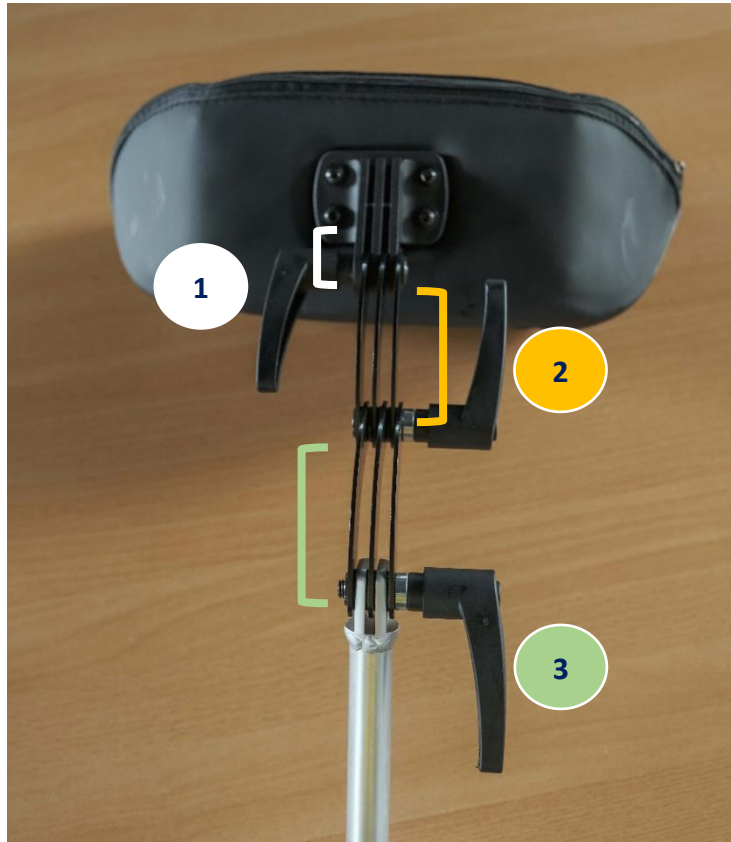

Comme indiqué sur la photo :

- La poignée n°1 permet de régler l'angle du coussin
- La poignée n°2 règle l'axe du milieu
- Et la poignée n°3 règle l'axe du bas

De cette manière, vous avez une capacité de réglage de l'appui-tête à tout niveau (hauteur, angle...) :



Et le coussin lui-même est aussi modulable, vous pouvez lui donner une forme de U pour bien caler la tête, ou au contraire, le laisser plat.

L'installation est désormais bien terminée, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous rencontrez une quelconque difficulté !

A bientôt ! L'équipe Handynamic